



raimo®

suoja-visiiri

CE EN 1661 S3





SPEDE-IDEA OY

spede-idea.com

VÄLITÄ TUNTEITA - PISAROIDEN SIJAAN

Haluan suojata
myös silmäni

- Suojaa silmät, suun, nenän, hiukset ja silmälasit
- Suojavisiirillä suojaat helposti itsesi ja läheisesi:

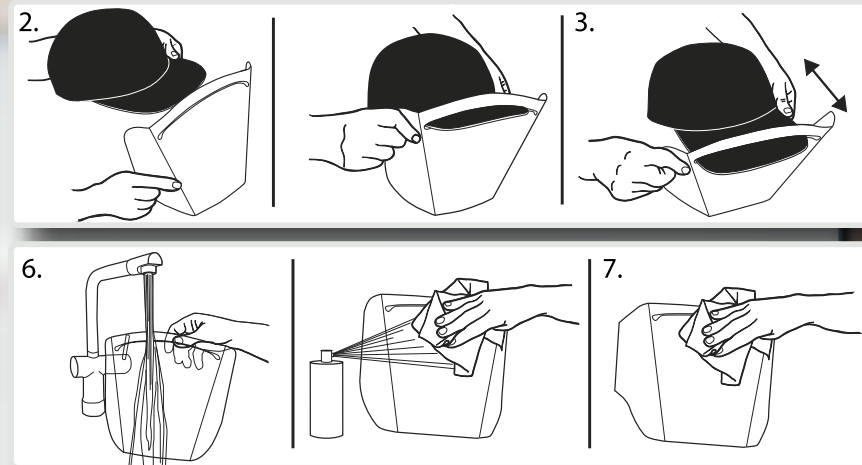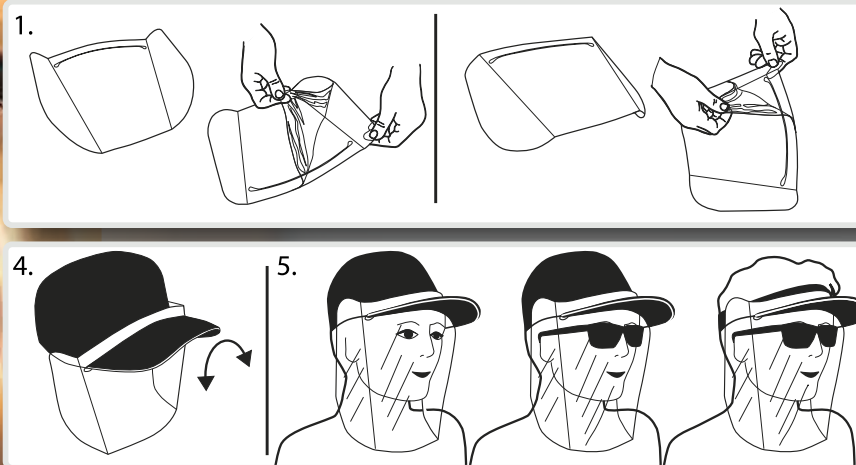

Käyttöohjeet: RAIMO Suojavisiiri on tarkoitettu käyttäjensä henkilökohtaiseen kasvojen ja silmien suojaukseen teollisuudessa, terveydenhuollossa, laboratorioissa, koulutuksessa, yksityiskäytössä ja muissa samankaltaisissa käyttötarkoituksissa. Suojavisiiri suojaa käyttäjäänsä ilmassa leijuvilta seoksilta, roiskeilta, pieniltä partikkeleilta, nestemäisiltä pisaroilta ja ilmassa lentäviltä roskilta. Suojavisiirin käyttö on tarkoitettu yli 14 vuotiaalle. Suojavisiirin käyttö ei ole tarkoitettu suojaamaan suurilla nopeuksilla lentäviä partikkeleita tai biologisia uhkia vastaan.

VAROITUS: STAATTISEN SÄHKÖN MAHDOLLISUUS, ÄLÄ KÄYTÄ KÄSITELTÄESSÄ RÄJÄHTÄVIÄ TAI HELPOSTI SYTTYVIÄ AINEITA

1. Pese ja kuivaa kädet. Irroita suojakalvot molemmilta puolilta visiiriä
2. Kiinnitä visiiri uran läpi päähineen lippaan.
3. Säädä etäisyys kasvoihin sopivaksi.
4. Pyöristämällä lippaa visiiri lukittuu haluamasi muotoon.
5. Visiiri on käyttövalmis kaaren muodostuessa ulospäin.
6. Pese visiiri lämpimällä vedellä ja saippualla tai desinfioi uudelleen käyttöä varten.
7. Kuivaa pehmeällä liinalla.
8. Lippalakkin puhdistus pyykinpesuaineella, +40 C käsipesu tai pintakäsittely alkoholipitoisella desinfiointiaineella.
9. Säilytys normaalissa huonelämpötilassa.
10. Käytä vain alkuperäisiä Raimo komponentteja tai vaihto-osia.

Suojavisiirin etuja ja käyttövinkkejä

Suojaa silmiä,
nenää, suuta,
hiuksia ja silmälaseja
työtehtävissä

- Suojavisiiri suojaa sekä käyttäjää, että vastaanottajaa.
- Suojavisiiri peittää suun, nenän lisäksi myös silmät, joissa on pisaroille herkät limakalvot.
- Suojavisiiri ei ole kertakäyttöinen vaan sen voi puhdistaa helposti ja käyttää aina uudelleen.
- Vaikka suojavisiiri ei ole sertifioitu suojainvaruste iskuja vastaan, ovat käyttäjät huomanneet sen hyödylliseksi esimerkiksi metsässä kulkiessa, spraymaaleilla maalatessa, autoa pestessä tai muissa silmille ja kasvoille suojaa haluttavissa työtehtävissä ja harrastuksissa.
- Vaikka suojavisiiri ei korjaa nenä/suumaskia, sopii se käytettäväksi sellaisissa fyysisesti raskaammissa suorituksissa, joissa nenä/suumaski on liian kuuma ja haittaa hengitystä.
- Joissain tilanteissa käyttäjät kuten myös terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat todenneet suojavisiirien ja nenä/suumaskin yhteiskäytön erittäin tehokkaaksi suojauskeinoksiä.

Suojavisiirin käytöstä

Suojaa myös heitä
jotka eivät voi
nenä/suumaskia
käyttää

- Kuten hyvin tiedämme, visiiri tai maski ei anna täydellistä suojaa taistelussa koronaa tai muita viruksia/bakteereita vastaan. Monissa työtehtävissä varsinkin palvelualalla asiantuntijat (ja hallitukset ympäri maailmaa) suosittelevat visiirin käyttöä, sillä se on erittäin tehokas suojauskeino käyttäjälleen.
- Suomessa on myös miljoona hengitystieoireista kärsivää kansalaista, jolle maskin käyttö on vaikeaa tai mahdotonta perussairauksien tai esim. astman vuoksi. Kaikkein paras yhteisvaikutus on käyttää kaikkia olemassa olevia keinoja (maski ja/tai visiiri) sekä ennen kaikkea pitää huolta turvaväleistä ja hygieniasta.
- Maksimaalisen suojauksen aikaansaamiseksi suositlemme suojavisiirin ja nenä/suomaskin samanaikaista käyttöä - monissa tilanteissa myös ammattikäyttäjät ovat todenneet suojavisiirin ja nenä/suomaskin yhteiskäytön hyväksi.

Helppokäyttöisyys

Tämänhän
saa käyttöön
sekunneissa!

- Sopii lippalakkeihin joissa on kaareva lippa, suoran lipan voi yleensä käyristää kaarelle.
- Helppo ottaa käyttöön; ergonominen suojavisiiri kiinnittyy haluamaasi kohtaan lippaa ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta, jolloin etäisyys kasvoihin on kätevästi säädettävissä.
- Suojavisiiri sopii myös muihin päähineisiin, joissa on lippa esim. aurinkolippa.
- Suojavisiiri sopii käytettäväksi myös silmälasien tai aurinkolasien kanssa niitä huurruttamatta.
- Visiirin voi tarvittaessa hetkellisesti helposti kääntää pois kasvojen edestä esim. juodessa ja kääntää takaisin kasvojen suojaksi.
- Voit säilyttää suojavisiiriä litteänä vaikka pussin suojassa ja ottaa käyttöön tarvittaessa.

Hygieenisuus

Mukava käyttää ja helppo puhdistaa.

- Suojavisiiri toimitetaan niin, että sen kummallakin puolella on suojakalvo puhtauden ja kirkkauden varmistamiseksi. Suojakalvo poistetaan kun suojavisiiri otetaan käyttöön.
- Suojavisiiri on helppo pitää puhtaana pesemällä se vedellä ja saippualla/astianpesuainella /desinfiointiaineella ja kuivaamalla se pehmeällä materiaalilla. Voit myös kuivattaa suojavisiirin näppärästi kiinnittämällä sen lippaan kuivumaan!
- Suojavisiirissä ei ole hihnoja, säätöruuveja tai muita hankalasti puhdistettavia osia
- Suojavisiirin huolellinen puhdistus ja desinfiointi suositellaan aina käytön jälkeen

Avoim ja selkeä kommunikaatio

Välitä tunteita
pisaroiden sijaan

- Suojavisiiriä käytettäessä suun ja kasvojen ilmeet näkyvät, jolloin kommunikaatio on käyttäjien mukaan huomattavasti sujuvampaa kuin jos nenä ja suu ovat peitettynä.
- Suojavisiiristä on ollut paljon apua muun muassa terapiatyössä, vanhusten ja lasten hoitotyössä sekä kaikissa ihmistenvälisiä kontakteja vaativissa työtehtävissä, jolloin lämminhenkinen kohtaaminen ja molemminpuolisen vuorovaikutuksen turvallinen tunne on tärkeää välittää – vuorovaikuta ja välitä tunteita pisaroiden sijaan.
- Käyttäjät ovat kokeneet, että lippalakkiin kiinnitettävä suojavisiiri on lähes huomaamaton ja sen kanssa toimiminen kaikenlaisissa palvelutilanteissa kuten asiakaspalvelussa ja opetustyössä on helppoa. Asiakaspalvelussa suojavisiirin voi usein kiinnittää jo valmiiksi käytössä oleviin lippalakkeihin tai lipallisiin päähineisiin.
- Viranomais- ja turvallisuushenkilöstön työssä selkeä, kerralla ymmärretty viestintä on tärkeässä roolissaja läpinäkyvä suojavisiiri mahdollistaa sen. Lisäksi se sopii usein suoraan jo olemassa olevaan varustukseen ja vaatetukseen.

Asiakaspalvelu- ja yrityskäyttö

Tämän suojavisiirin kanssa
voin olla oma itseni ja
toimia kuten ennenkin!

- Käyttäjät ovat kokeneet tämän lippaan kiinnitettävän suojavisiirin mukavammasi käyttää, ilman vaivaantunutta ja epämukavaa oloa.
- Suojavisiirin ja lippalakin yhdistelmä on todettu erittäin ergonomiseksi ja ihmisten kasvojenpiirteitä sekä mittoja mukailevaksi.
- Suojavisiiri tai lippalakki on helppo brändätä yrityksen tunnuksilla ja näin viestiä yrityksen vastuullisuudesta asiakkaita ja työntekijöitä kohtaan.

Tyylikäs muotoilu

En halua tinkiä
tyylistäni!

- Suojavisiiri on muihin saatavilla oleviin vaihtoehtoihin verrattuna lähes näkymätön.
- Suojavisiirin ainutlaatuinen, itsensä paikalleen kiinnittävä muotoilu on huomaamattoman tyylikäs ja sopii valitsemaasi lipalliseen päähineeseen – tai lippaan jos et halua peittää hiuksia tai päätäsi.
- Suojavisiiri ei koske kasvohisi eikä mahdolliseen meikkiin.
- Suojavisiiri on luonteva osa turvallista katumuotia ja sen design sopii kaikkiin tyylihin niitä korostaen.

Menee pieneen tilaan, helppo säilyttää ja kuljettaa mukana.



Size M/L



Size XS/S



SPEDE-IDEA OY

spede-idea.com

CE EN 166 1 S 3

Spede-Idea Oy
FINLAND
www.spede-idea.com

raimo®
suojaviisiiri